

YOMPER™ MaxDrive

YOMPER Kompatibilitätsprüfung



Für YOMPER MaxDrive stehen zwei unterschiedliche Anbindungsoptionen zur Verfügung :

- Anbindung an Starrrahmenrollstühle
- Anbindung an Faltrollstühle

Kompatibilität mit Starrrahmenrollstühlen

YOMPER kann unter folgenden Voraussetzungen an Rollstühlen mit festem Rahmen betrieben werden:

- Der Rollstuhl verfügt über eine Rundrohrachse (Durchmesser von 23 bis 33mm).
- Unter der Sitzfläche ist eine Querverstrebung vorhanden (Durchmesser von 15 bis 30mm).



- Der Abstand zwischen den beiden Rohren (Achse und Querverstrebung) beträgt 130 bis 290mm.




- Die Bodenfreiheit unter der Sitzfläche und der Laufradachse beträgt mindestens 260mm.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, ist YOMPER MaxDrive mit einem Starrrahmenrollstuhl kompatibel.

Kompatibilität mit Faltrollstühlen

YOMPER kann unter folgenden Voraussetzungen an faltbaren Rollstühlen betrieben werden:


- Der Aussendurchmesser der längsverlaufenden unteren Rahmenrohre beträgt zwischen 23mm und 25.4mm (max. 26mm).
- Der Abstand zwischen den längsverlaufenden unteren Rahmenrohren beträgt 320 bis 430mm.

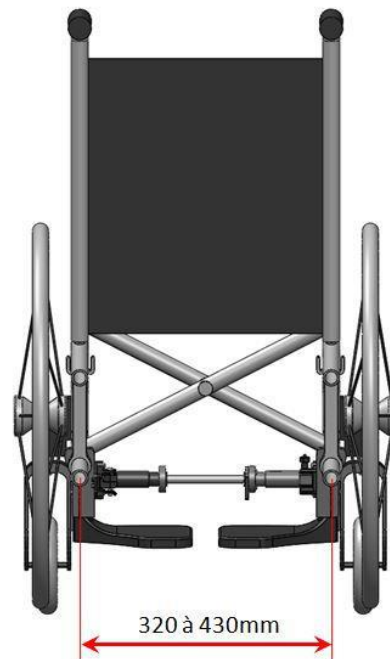

- Die längsverlaufenden unteren Rahmenrohre (am Punkt der Klammerbefestigung) befindet sich auf einer Höhe zwischen 225 und 255mm.
-



- Der Abstand zwischen der Laufradachse und dem Faltmechanismus beträgt mindestens 150mm.

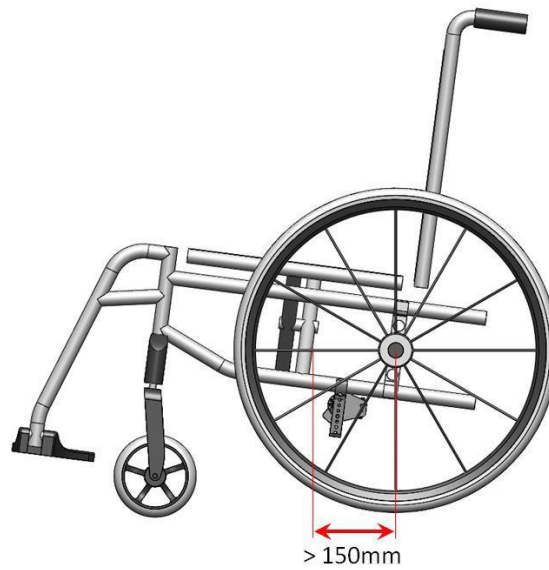

- Die Bodenfreiheit unter der gesamten Sitzfläche und dem Faltmechanismus beträgt mindestens (mittig) 260mm.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, ist YOMPER MaxDrive mit einem faltbaren Rollstuhl kompatibel.



MaxMobility GmbH

info@maxmobility.de

Tel. 07431/93913-0

Fax. 07431/93913-29